


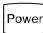



Kvikguide til MSU2 scanner

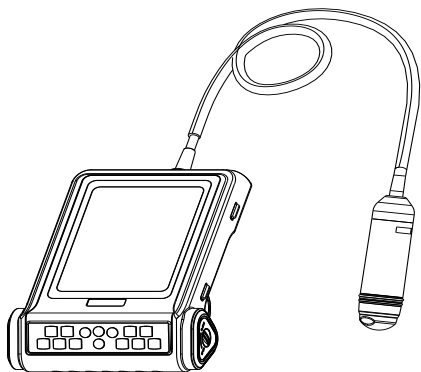


Opstart og lukning



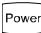


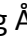



Når udstyret er afbrudt: Tryk på tasten . Udstyret starter og strømindicatoren  lyser.

Når der er tændt for udstyret: Tryk på tasten , udstyret slukker og strømindicatoren  slukker. Bemærk, at når der skal slukkes for udstyret, skal der trykkes på tasten i længere tid end ved normal brug.






Modsat skærmvisning

Hold fryse  knappen nede i et stykke tid for at aktivere modsat skærmvisning i forbindelse med venstre/højre hånds brug.


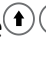



Indstilling af ur

1. Frys billedet, og tryk på piletasterne   for at flytte markøren til "Preset"
2. Tryk på piletasterne   for at åbne indstillingsskærbilledet
3. Tryk på piletasterne   for at vælge "Minutter, Timer, Dag, Måned og År";
4. Ved indstilling af minutter, timer, dag, måned og år trykker du på piletasten  for at tælle opad og piletasten  for at tælle nedad
5. Tryk på tasten  for at bekræfte indstillingen af uret og lukke indstillingsskærbilledet.

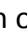




Indstilling af total forstærkning (grundindstilling 100)

I realtidstilstand trykker du på tasten  for at åbne hovedmenuen og på piletasterne   for at flytte markøren til "Gain" i visningsområdet. Tryk på piletasten  for at øge den totale billedforstærkning og på piletasten  for at reducere forstærkningen og på den måde styre den samlede forstærkning af hele billedet.



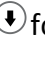


Indstilling af nærfelt-forstærkning (grundindstilling -31)

I realtidstilstand trykker du på tasten  for at åbne hovedmenuen og på piletasterne   for at flytte markøren til "Near" på skærmen. Tryk på piletasten  for at øge nærfelt-forstærkningen og på piletasten  for at reducere nærfelt-forstærkningen og på den måde styre forstærkningen i nærfelt-området.




Indstilling af fjernfelt-forstærkning (grundindstilling 31)

I realtidstilstand trykker du på tasten  for at åbne hovedmenuen og på piletasterne   for at flytte markøren til "Far" på skærmen. Tryk på piletasten  for at øge fjernfelt-forstærkningen og på piletasten  for at reducere fjernfelt-forstærkningen og på den måde styre forstærkningen i fjernfelt-området.

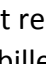




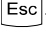
Indstilling af dynamisk område (grundindstilling 43)

I realtidstilstand trykker du på tasten  for at åbne hovedmenuen og på piletasterne   for at flytte markøren til "Dyn" på skærmen. Tryk på piletasten  for at øge værdien for dynamisk område og på piletasten  for at reducere værdien for dynamisk område og på den måde styre det dynamiske område for hele billedet.






Valg af forstørrelse (grundindstilling 1,0)

I realtidstilstand trykker du på tasten  for at åbne hovedmenuen og flytte markøren til "Zoom". Tryk derefter på piletasterne   for at vælge en af de fem typer forstørrelse.



Valg af dybdeområde (grundindstilling 20)

I realtidstilstand trykker du på tasten  for at åbne hovedmenuen og på piletasterne   for at flytte markøren til "Depth" på skærmen. Tryk derefter på piletasterne   for at vælge dybde, og tryk på  for at lukke valget af dybdeområde.

Valg af farve

I realtidstilstand trykker du på tasten  for at åbne hovedmenuen og på piletasterne   for at flytte markøren til "Color" på skærmen. Tryk derefter på piletasterne   for at skifte mellem otte farver (inkl. en slags sort og hvid).

Frysning/frigørelse af billede

I realtidstilstand trykker du på tasten  eller på den midterste musetast for at fryse billedet. Er billedet frosset, trykker du på tasten  eller den midterste museknap for at frigøre billedet.