

Bovidiar

Instruktions/Instructions manual



- 1) Udtag en fæcesprøve direkte fra anus af kalven. Udtag en hel skefuld, hvis afføring er meget tynd.

Take a sample directly from the anus of the calve. Get a full spoon if the diarrhea is very thin.



- 2) Ved tyk afføring fjernes overskydende med træspatel.

Thicker diarrhea - remove surplus with wooden spatula.



- 3) Indholdet skal fylde skeen jævnt.

Content should evenly fill the spoon.



- 4) Skeen placeres i testrøret.

Place the spoon in the test tube.


Bovidiar

Instruktions/Instructions manual



- 5) Ryst testrøret for at blande afføring med buffervæsken.

Shake the test tube firmly to mix the diarrhea with the buffer solution.

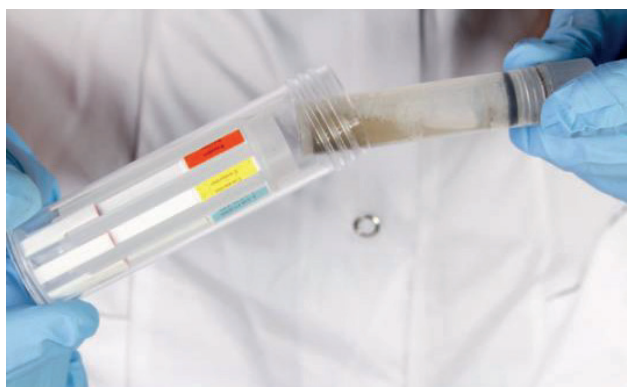


- 6) Placer testrøret i glasset og pres det mod bunden indtil du mærker et click.

Push the test tube in the test bottle and push it to the bottom until you feel a click.



- 7) Skru låget på glasset og vent 10 minutter. Væsken vil opsuges af teststrips. Efter 10 minutter ses kontrolmærkerne. Hvis testmærkerne også bliver synlige, er prøven positiv. Hvis kun kontrolmærkerne er synlige, er prøven negativ. .

Close the test bottle and wait for 10 minutes. The fluid will run over the test strips. After 10 minutes the control lines will appear on each strip. If the testline also becomes visible, the test is positive. If only the control line visible, the test is negative.

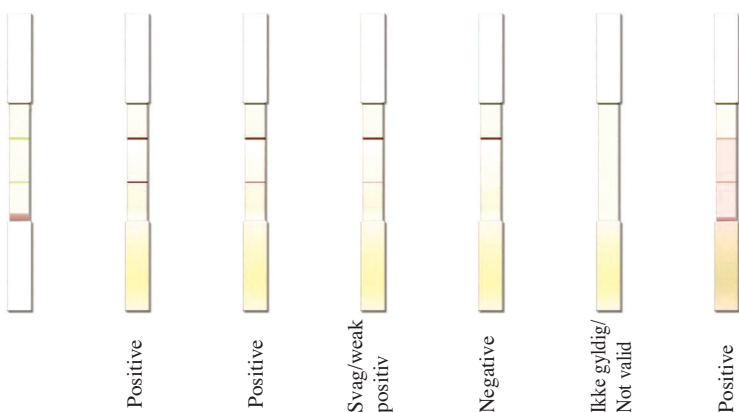

Positive

Positive

Svag/weak
positiv

Negative

Ikke gyldig/
Not valid

Positive